

Виправлення помилки E31 в кисневих концентраторах KSOC

1. Увімкніть прилад та затисніть кнопку живлення на 10 секунд;



2. Після цього прилад перейде в заводський режим, на дисплеї має відобразитися наступні значення:



3. В цьому режимі затисніть кнопку живлення до тих пір поки на дисплеї не відобразиться значення №09;



4. В цьому режимі, коли на дисплеї відображено №09, натисніть на кнопку плюс або мінус, щоб отримати значення «NO», як це зображено знизу:



5. Після того як налаштування виконано необхідно залишити прилад на декілька хвилин. Із заводського режиму він автоматично перейде в робочий режим;



6. Перезавантажте прилад – вимніть а потім увімкніть заново. Помилка E31 має бути виправлена.

