

# ПУЛЬСОКСИМЕТР МОДЕЛЬ S8P

## ОПИС

1. Підходить для дітей 1-12 років;
2. Ідеально підходить для маленьких дитячих пальців;
3. Має яскравий, привабливий для дітей дизайн;
4. Автономатичне вимкнення приладу через 8 секунд.
5. Компактний розмір, маленька вага, зручний у використанні.

**Натисніть кнопку живлення, щоб переключити режим відображення на різні кути.**

## НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

При затисканні кнопки живлення (3 сек.) на екрані з'явиться меню з налаштуваннями пульсоксиметра, а зміна параметрів проводиться подальшим утриманням кнопки в перебігу нетривалого часу:

**Alm** - включення оповіщення - варіанти: ON / OFF;

**DIR** - перемикання змін параметрів - варіанти: UP / DOWN (збільшення / зменшення параметрів);

**SpO2 High** - максимальне значення вимірювання SpO2 - від значення SpO2 Low +1 до 99;

**SpO2 Low** - мінімальне значення вимірювання SpO2 - від 70 до значення SpO2 High -1;

**PR High** - максимальне значення вимірювання частоти серцебиття - від PR Low +1 до 250;

**PR Low** - мінімальне значення вимірювання частоти серцебиття - від 25 до PR High -1;

**Default** - при тривалому утриманні кнопки на цьому пункті меню відбувається скидання налаштувань до заводського значення: Alm - Off, DIR - UP, SpO2 High - 99, SpO2 Low - 90, PR High - 120, PR Low - 50;

**Exit** - вихід з меню налаштувань.

## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставте палець в прорезинений отвір пульсоксиметра нітьовою пластиною догори.
2. Натисніть кнопку на передній панелі приладу.
3. Не рухайте пальцем і не змінюйте положення тіла доки триває діагностика.
4. Натисніть кнопку, якщо хочете змінити режим відображення.
5. Прочитайте результати дослідження на екрані.
6. Прилад автоматично вимкнеться через 8 секунд, якщо немає сигналу для діагностики.

**Зауваження:** Використовуйте спирт для дезінфекції прорезиненої поверхні перед кожним дослідженням, а також дезінфікуйте спиртом палець до та після кожного дослідження. (Матеріал прорезиненої поверхні пульсоксиметра не містить токсинів, не шкідливий та не викликає алергічних реакцій).




## КРІПЛЕННЯ ШНУРКА

1. Протягніть шнурок тонким кінцем через отвір.
2. Протягніть шнурок ширшим кінцем через отвір у звисаючому кінці цього ж шнурка, затягніть.

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Тип дисплея: OLED;
2. SpO2: діапазон вимірювання 70% ~ 99%  
Точність: 80% ~ 99%: ± 2%;  
70% ~ 79%: ± 3%;  
нижче 70% не визначена  
Похибка: ± 1%;
3. PR Діапазон вимірювання (частоти серцебиття):  
30bpm ~ 240bpm  
Точність ± 1 bpm або ± 1%;
4. Живлення: літєвий акумулятор. Зарядка через кабель mini-USB.
5. Оповіщення про критичні значення: звуковий сигнал;
6. Індикатор заряду батареї: є;
7. Автоматичне вимкнення: пристрій вимикається автоматично, якщо в ньому немає пальця протягом 8 секунд;
8. Робоча температура: 5 °C ~ 40 °  
відносна вологість 15% -80 %  
атмосферний тиск 70 кПа ~ 106 кПа.

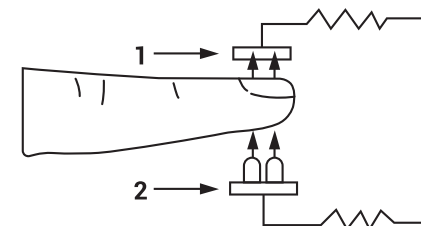

## ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ:

На нижній частині розташований відсік для установки батареї. Живлення пульсоксиметра здійснюється літєвим акумулятором, кабель для якого входить в комплект поставки.

Контроль рівня заряду батареї можна відстежувати за допомогою відображуваного на екрані дисплея індикатора. Пульсоксиметр має вбудовану систему збереження заряду батареї, яка вимикає пристрій через 8 секунд.

**Примітка:** Ця функція не працює, якщо Ви залишите пристрій включеним в режимі вибору параметрів в меню. Таким чином, при контролі відключення пристрою батарея дозволить використовувати пульсоксиметр до 50 годин.

**Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців від дати продажу у роздрібній мережі.**

**Виробник:** CMICS Medical Instruments Co., Ltd.  
14, Zhongkai Hi-Tech Development zone, Huizhou, Guandong,  
516006 P.R.China

КМІКС МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТС КО., ЛТД.  
14, Шанхай Xi-Теч Девелопмент зон, Хуїджоу, Гуандонг,  
516006, Китайська Народна Республіка

**Імпортер:**  
ТОВ «Торговий Дім «Віктор Плюс»  
04210, Україна, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корп. 1  
Телефон: (044) 581-11-42  
e-mail: sale@voles.com.ua  
www.voles.com.ua

Дата випуску: 20.11.2020

