

# **CITO TEST® Гепатит В**

**Застосування:** CITO TEST Гепатит В – експрес-тест для діагностики вірусного гепатиту В у домашніх умовах.

***Для самоконтролю!***

**Загальна інформація:** Гепатит В — потенційно небезпечне для життя інфекційне захворювання печінки, збудником якого є вірус гепатиту В (ВГВ). Це захворювання представляє собою серйозну проблему охорони здоров'я у всьому світі. Інфекція може переходити у хронічну форму з високим ризиком смерті від цирозу та раку печінки.<sup>1</sup>

**Важливо!!!** У нашій країні рівень захворюваності на гепатит В залишається дуже високим – за підрахунками науковців, дійсна кількість захворювань перевищує офіційну статистику. А отже, **діагностику вірусних гепатитів необхідно проводити усім: людина перебуває у групі ризику до тих пір, поки не знає інфікована вона чи ні!**

**В УКРАЇНІ ТІЛЬКИ 5% ІНФІКОВАНИХ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В И С ЗНАЮТЬ ПРО СВІЙ СТАТУС!<sup>2</sup>**

**Переваги теста:**

- **швидко:** результат через 15 хв.
- **анонімно**
- **точно – чутливість та специфічність більше 99,9%<sup>3</sup>**

**Комплектація:**

- тест-касета
- піпетка
- буфер
- скарифікатор (ланцет) автоматичний
- спиртова серветка (2 шт.)
- рукавички одноразові
- інструкція




## ПРОСТА ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ ТА ОБЛІКУ



### ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

1

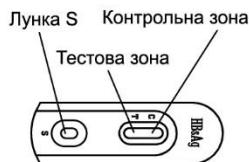

2




3



### ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ

4

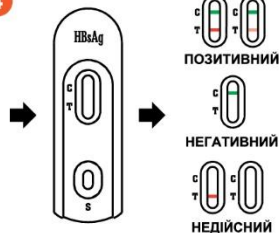

**ПОЗИТИВНИЙ:** з'являються дві чіткі кольорові лінії: тестова (Т) та контрольна (С). Позитивний результат – поява тестової лінії будь-якої інтенсивності – підтверджує наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту В HBsAg в зразку капілярної крові.

**НЕГАТИВНИЙ:** поява однієї чіткої кольорової контрольної (С) лінії. Кольорова тестова (Т) лінія відсутня.

**НЕДІЙСНИЙ:** контрольна лінія (С) не з'являється.

**Умови зберігання:** Зберігати тест запакованим при температурі 15-30°C. Термін зберігання – 24 міс. Не заморожувати!

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>

2. WHO Global health sector strategy on viral hepatitis, 2016-2021. 2016. 56 P. URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1>

3. Інструкція до CITO TEST Гепатит В