

FARMACTIVE® Сс'юма ПУ

Українська

Опис виробу

FARMACTIVE® Сс'юма ПУ є стерильна неклеяка пов'язка, що складається із гідрофільного поглинаючого поліуретанового губчастого покриття заламінованого ззовні для водостійкості, але із дихаючою мембраною.

В адгезивному типі, мембрана вкрита ніжною акриловою клейкою пластиною із розташованою в центрі пов'язки для контакту із раною поліуретановою губкою. Виріб застосовується центральною губчастою частиною безпосередньо до рани. Вторинна пов'язка не потрібна.

Покази до використання

FARMACTIVE® Сс'юма ПУ призначений для догляду ран із помірною і великою ексудацією, таких як:

- Пролежні - рани з частковим або повним ушкодженням шкіри
- венозні виразки - донорські ділянки шкіри

Протипокази

FARMACTIVE® Сс'юма ПУ не призначається для використання у наступних випадках:
- опіки третього ступеня, сухі рани, інфіковані рани

Запобіжні заходи

Пов'язка може прилипати у випадку, якщо використовується на ранах зі дуже низьким рівнем виділень. Якщо пов'язку важко зняти, попередньо зволожити її стерильним сольовим розчином перед видаленням. Не застосовувати для пацієнтів із чутливістю до поліуретанової мембрани.

FARMACTIVE® Сс'юма ПУ не призначений для зупинки кровотечі.

Інструкції щодо використання

Підготовка ділянки

1. очистити рану відповідним розчином та очистити, осушити шкіру перед застосуванням пов'язки.
2. якщо необхідно, пов'язку можна розрізати.
3. розташуйте по центрі та застосуйте її на рані
4. зафіксуйте пов'язку відповідною клейкою стрічкою або у випадку адгезивної FARMACTIVE® Сс'юма ПУ зафіксуйте пов'язку на шкірі навколо рани, легким притисканням.

Зміна і зняття пов'язки

1. FARMACTIVE® Сс'юма ПУ може застосуватися протягом 7 днів, залежно від стану пацієнта та рівня виділень. Спочатку, може бути необхідно змінювати пов'язку кожні 24 години, або ж коли це буде необхідно за призначенням фахівця.
2. Для повторного застосування, акуратно видаліть вторинну пов'язку. Якщо рано суха — змочити пов'язку сольовим розчином перед зняттям.
3. Акуратно зніміть пов'язку із рани і викиньте.
4. Промийте рану перед застосуванням нової пов'язки.

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому місці. Не використовувати повторно. Не стерилізувати повторно. Не використовувати, якщо індивідуальна упаковка пошкоджена/відкрита. Використати до дати, зазначеної на упаковці.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

СТЕРИЛЬНО
стерильно до
моменту відкриття
упаковки

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська обл.,
Україна, 46020
тел.: +380678824190
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА
Віа Персичетана, 26 - 40012
Кальдерара-ді-Рено,
Болонья - Італія
www.farmaczabban.com
company@farmaczabban.com

Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- метод стерилізації



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)