

LUXAMED®

**СТЕТОСКОПИ LUXAMED® LUXASCOPE SONUS I
SONUS FLEX**



LUXAMED®



LUXAMED GmbH & Co. KG *
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germany
Tel.: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10 *
Email: info@luxamed.de * www.luxamed.de



Щоб забезпечити належне використання цього продукту LUXAMED®, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник

користувача та збережіть його для використання в майбутньому.

Стетоскопи LUXAMED® LuxaScope Sonus i Sonus Flex

Передбачуване використання:

Стетоскопи LUXAMED® LuxaScope Sonus використовуються для аускультації. Крім того, стетоскопи можна використовувати для вимірювання артеріального тиску за Коротковим.

Ці інструменти можуть використовуватися лише авторизованим, навченим персоналом.

Стетоскопи LUXAMED LuxaScope Sonus не містять латексу.

Використовуйте пристрій лише за призначенням.

**УВАГА:**

Перед кожним використанням переконайтеся, що вушні насадки SOFTBUDS правильно прикріплені до дужок. **НІКОЛИ** не використовує навушники без насадок SOFTBUDS. Ергономічно відрегулюйте дужки відповідно до ваших потреб, щоб досягти оптимальної якості слуху.

Переконайтеся, що вушні насадки SOFTBUDS не проникають далеко в вушний канал. Це може спричинити серйозні травми.

Щоб уникнути погіршення якості слуху, тримайте вушні насадки SOFTBUDS та дужки чистими.

Використовуйте стетоскопи лише з запасними частинами та аксесуарами Luxamed.

Застосування:

Стетоскопи призначені для використання медичними працівниками для аускультатії фізіологічних звуків і шумів. Для вимірювання артеріального тиску за Коротковим використовують стетоскопи для діагностики систолічного та діастолічного артеріального тиску.

Стетоскоп складається з нагрудної частини, трубки з бінауральною частиною та фіксованих вушних насадок SOFTBUDS. Luxamed має різні версії у

своєму асортименті продукції з багаторазовими типами діафрагми та воронкою, а також одноразовими версіями, як описано нижче: Просто розігніть обидві бінауральні частини, щоб відрегулювати фізіологічний стан головної частини. Щоб створити більший тиск між вушними насадками SOFTBUDS і вушними раковинами, зігніть обидві бінауральні системи разом. Будьте дуже обережні, щоб не допустити надмірного розтягування. Стетоскоп з подвійною головкою складається з діафрагми та сторони воронки, які можна вибрати відповідно до частоти. Однією рукою ви фіксуєте нагрудну частину, а іншою рукою – трубку. Поверніть головку стетоскопа на 180° до фіксації. Якщо вхідний отвір для звуку з боку воронки закрито, сторона діафрагми або мала мембрана активна. І навпаки, можлива аускультация воронкою.

Різні версії стетоскопа:

LuxaScope Sonus: стетоскоп з нержавіючої сталі, реверсивний для звуків високої та низької частоти, доступний у різних кольорах і 2 розмірах (для дорослих/дітей, для дітей/немовлят).

Стетоскопи LuxaScope Sonus Flex: реверсивний стетоскоп для звуків високих і низьких частот, доступний у різних кольорах і в 1 розмірі (для

дорослих), змінна діафрагма та кільце діафрагми для багаторазового використання знімається простим натисканням або зніманням.

Очищення:

Після кожного використання стетоскоп слід очищати вологою тканиною (використовуйте рН-нейтральні або слаболужні чистячі засоби).

Дезінфекція:

Дезінфекція або дезінфекційне очищення зовнішніх поверхонь стетоскопа проводиться простою дезінфекцією. Використовуйте дезінфікуючі засоби, дозволені для використання на медичних пристроях із пластику або гуми. Дезінфекція методом розпилення та занурення не схвалена. Дезінфекція стетоскопів LixaScope Sonus Flex не є абсолютно необхідною. Багаторазову діафрагму або діафрагмове кільце багаторазового використання необхідно продезінфікувати, як зазначено вище, або замінити після застосування.

Стерилізація:

Стерилізація не дозволена.

Утилізація:



Цей виріб та його аксесуари можна утилізувати разом із побутовим сміттям.

Умови зберігання, транспортування та експлуатації:

Температура навколишнього середовища від -10° до $+40^{\circ}$

Відносна вологість від 10% до 90%.

Пояснення символів

	Виробник
	Дата виготовлення
	Зверніться до посібника користувача
	Застереження
	Відповідає директивам ЄС
	Медичний пристрій

Виробник:
LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 - 89143 Blaubeuren - Germany

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЛР».
Адреса офісу: вул. Печерський узвіз 13, офіс 132,
01021 Київ, Україна. Веб-сайт: <https://med.hlr.ua/>

Контакти сервісного центру в Україні:

07400 вул. Січових Стрільців (Щовківська), 8
Київська обл., м. Бровари.

тел.

№1+38(067)-882-05-94;

тел. №2 +38(067)-882-05-95

www.luxamed.de