

FARMACTIVE® Гідро

Українська

Опис виробу

FARMACTIVE® Гідро являє собою стерильну пов'язку для ран, що складається з шару гідроколоїду, який контактує з раною, нанесений на плівку з поліуретану, напівпроникна. Фармактів Гідро

є зручною і, якщо використовується за призначенням, є водонепроникною і захищає потраплянню бактерій із чудовою здатністю стримувати рідину.

Покази до використання

FARMACTIVE® Гідро призначений для ран з малою та/або помірною кількістю виділень, таких як:

пролежневі виразки, венозні виразки, рани з порожнинами, донорські рани шкіри.

Серед інших показань: часткове і повне ушкодження шкіри, садна, травми, післяопераційні хірургічні рани і поверхневі опіки.

Протипокази

Не використовуйте FARMACTIVE® Гідро у наступних випадках:

опіки третього ступеня

сухі рани

Заходи безпеки

Пов'язка може прилипати, якщо вона наноситься на рани, які мають невелику ексудацію. Якщо пов'язка не знімається легко, її необхідно зволожити стерильним фізіологічним розчином перед видаленням.

Не застосовувати у пацієнтів, які, як відомо, є чутливими до гідроколоїдів. FARMACTIVE®

Гідро не використовується для зупинки кровотечі.

Інструкція для використання

Підготовка

Очисти при необхідності і зволожити місце рани відповідно до стандартів протоколів.

Видалить надлишок розчину з шкіри.

Застосування пов'язки

Вибери відповідний розмір пов'язки, залишивши з краю рани по 2 см навколо, щоб забезпечити приклеювання до здорової шкіри.

Нанесіть пов'язку так, щоб вона правильно прилягала до здорової шкіри: поліпшиться з підвищенням нагрівання пов'язки.

Зміна пов'язки

FARMACTIVE® Гідро може залишатися до 3-5 днів залежно від стану пацієнта та рівня виділень.

FARMACTIVE® Гідро слід тримати на рані так довго, наскільки це можливо, щоб зменшити ризик травми пошкодження тканини.

Щоб повторно застосувати, зніміть пов'язку, обережно піднявши край.

Обережно видаліть пов'язку з рани і зніміть.

Щоб видалити залишки гелю, зволожите місце рани перед нанесенням нової пов'язки.

Зберігання

Зберігайте в прохолодному, сухому місці

Попередження

Не використовуйте повторно. Не стерилізуйте повторно. Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена або відкрита. Термін придатності продукту вказаний на виробі.

Біосумісність

В результаті клінічних досліджень, проведених на лабораторних тваринах, було показано, що FARMACTIVE® Гідро не є токсичним і не викликає подразнення шкіри або алергічних явищ.

Утилізація

Виріб утилізується як звичайні клінічні відходи відповідно до місцевих правил.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

СТЕРИЛЬНО

стерильно до моменту відкриття упаковки

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська обл.,
Україна, 46020
тел.: +380678824190
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА
Віа Персічетана, 26 - 40012
Кальдерара-ді-Рено,
Болонья - Італія
www.farmaczabban.com
company@farmaczabban.com

Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- метод стерилізації



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)