

FARMACTIVE® Альгінат

Українська

Опис виробу

FARMACTIVE® Альгінат є кальцій натрію альгінат доступний у вигляді пов'язки для рани та стрічки, які є зручними і створюють ідеальне вологе середовище для загоєння рани.

Покази до використання

FARMACTIVE® Альгінат призначений для догляду за ранами із помірно та великою кількістю виділень, таких як:

- пролежні
- порожнинні рани
- венозні виразки
- рани донорських ділянок шкіри

Протипокази

Альгінат не призначається для використання у наступних випадках:

- опіки третього ступеня
- сухі рани
- хірургічні імплантації
- інфіковані рани

Заобіжні заходи

Пов'язка може прилипати до рани у випадку, якщо використовується на ранах із дуже низьким рівнем виділень. Якщо пов'язку важко зняти, попередньо зволожіть її стерильним сольовим розчином перед видаленням. Не застосовувати для пацієнтів із чутливістю до анальгінів.

FARMACTIVE® Альгінат непризначений для зупинки сильної кровотечі.

Інструкції щодо використання

Підготовка ділянки

- очистити, якщо необхідно, промити ділянку рани відповідно до стандартів протоколів.
- видалити залишки розчину на шкірі.

Застосування пов'язки

1. Розріжте або складіть пов'язку по рани. Випновувати вільно для глибоких ран.
2. Накладіть безпосередньо на раневе ложе.
3. Покрийте і захистіть відповідною вторинною пов'язкою.

Зміна і зняття пов'язки

1. FARMACTIVE® Альгінат може застосуватися протягом 7 днів, залежно від стану пацієнта та рівня ексудації. Спочатку, може бути необхідно змінювати пов'язку кожні 24 години, або ж коли це буде необхідно.

2. Для повторного застосування, акуратно видаліть вторинну пов'язку. Якщо рана суха — змочіть пов'язку сольовим розчином перед зняттям.

3. Акуратно зніміть пов'язку із рани і викиньте.

4. Промийте рану перед застосуванням нової пов'язки.

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому місці.

Не використовувати повторно. Не стерилізувати повторно.

Не використовувати, якщо індивідуальна упаковка пошкоджена/відкрита.

Використати до дати, зазначеної на упаковці.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

СТЕРИЛЬНО

стерильно до моменту відкриття упаковки

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська обл.,
Україна, 46020
тел.: +380678824190
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА
Віа Персічетана, 26 - 40012
Кальдерара-ді-Рено,
Болонья - Італія
www.farmaczabban.com
company@farmaczabban.com

Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- метод стерилізації



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)