

Слуховий апарат CLEARTONE V100



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний клієнт!

Наш прилад – чудовий пристрій для людей, які хочуть чути краще.

Будь ласка, уважно прочитайте Посібник користувача перед використанням слухового апарату. Це допоможе вам правильно експлуатувати та обслуговувати пристрій, що суттєво продовжить термін його служби.

Якщо у вас виникнуть питання, зателефонуйте до нашого Центру обслуговування клієнтів. Наші представники обов'язково допоможуть

Основна інформація про прилад

Назва: Слуховий апарат CLEARTONE

Модель: V100

Розмір: 24,6 x 17,7 x 22,3 мм


Конструкція пристрою: Слуховий апарат складається з основного блоку, акумулятора та берушів.

Принцип роботи: Звуковий сигнал вловлюється мікрофонами, трансформується в цифровий сигнал, обробляється процесором, перетворюється назад на акустичний сигнал і передається користувачеві через динамік.

Противопоказання: Гострий зовнішній отит, хронічний гнійний отит, гострий гнійний отит, алергія на матеріал.

1

Конструкція

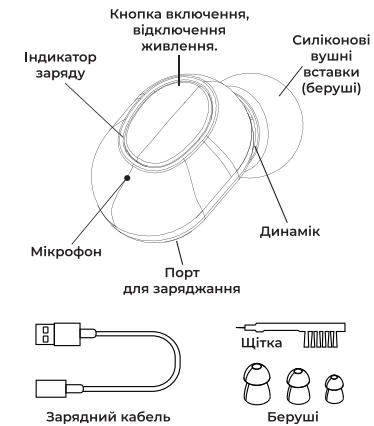

2


Специфікація

Допустимі умови роботи пристрою	
Температура навколишнього середовища:	0° - 40°С;
Відносна вологість:	< 80%;
Атмосферний тиск:	86кПа - 106кПа;
Робоча напруга:	3,7 В;
Електроакустичні характеристики приладу	
Максимальний OSPL90:	менше 115 дБ ± 3 дБ;
Рівень звукового тиску на виході (Середнє значення високої частоти):	110 дБ ± 4 дБ;
Повнодіапазонне посилення звуку (Середнє значення високої частоти):	25 дБ ± 5 дБ;
Еквівалентний рівень вхідного шуму:	29 дБ ± 3 дБ;
Діапазон частотної характеристики (не більше чем):	400 Гц - 4700 Гц;
Акумуляторна батарея:	Li-on (літій-іонний акумулятор);
Ємність:	50 мАг;
Номинальний робочий струм:	6 mA;

3

Підготовка до роботи

Виберіть відповідний розмір берушів (S, M, L) з комплекту та надягніть їх на головку слухового апарату. Якщо ви відчуваєте, що беруші не вставляються у вушний канал щільно, спробуйте використати виріб іншого розміру.

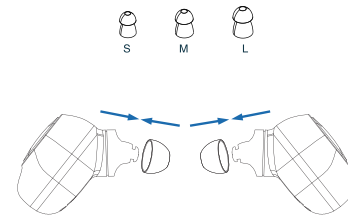

4

Початок роботи

1. Дістаньте TWS навушники з боксу (зарядного пристрою).
2. Виберіть відповідний розмір беруші (S, M, L) з комплекту та надягніть їх на головку приладу.
3. Утримуючи слуховий апарат великим та вказівним пальцями, обережно вставте вушний вкладиш у слуховий прохід.
4. Натисніть кнопку увімкнення та утримуйте її 3 секунди, щоб запустити навушники (як правий, так і лівий).

Регулювання гучності

Прилад має 5 рівнів гучності. Перемикання здійснюється наступним чином:

1. Натисніть клавішу включення один раз, при цьому слуховий апарат видасть звукову команду з двох коротких сигналів. Це означає, що гучність збільшилася на 1 рівень. Коли ви почуєте сигнали з трьох коротких сигналів, ви досягли максимального рівня гучності.

5

2. Знову натисніть кнопку, слуховий апарат видасть звуковий сигнал і гучність знову перемикається на рівень 1.

Будь ласка, не закривайте отвір мікрофона руками при регулюванні, інакше прилад буде видавати писк.

Заряджання слухового апарату

1. Діставши TWS навушники з вух, покладіть їх у бокс (зарядний пристрій). Попередньо вимкніть пристрій, натиснувши і утримуючи клавіші включення/виключення протягом 3 секунд.
2. Покладіть навушники в зарядний кейс. Засвітиться цифровий дисплей.
3. Лівий і правий навушник почне заряджатися. При цьому засвітиться зелений індикатор на кейсі з відповідної сторони.
4. Якщо зелений індикатор L і R не світиться, це означає, що слуховий апарат заряджений.

Повне заряджання приладу займає близько години. Слуховий апарат може працювати на одному повному заряді близько 12 годин.

6

Зарядка боксу (зарядного пристрою)

Для заряджання боксу використовуйте адаптер із вихідною потужністю не більше 5V (1A).

Підключіть зарядний кабель до адаптера та вставте його в гніздо USB на задній стороні боксу (зарядного пристрою). В цей час % заряду на екрані загориться і почне блимати. Коли число досягає 100%, це означає, що зарядний пристрій повністю заряджений.

Зарядка боксу (зарядного пристрою) зазвичай займає трохи більше 2 годин.

Повної зарядки боксу (зарядного пристрою) вистачає на 2 повних зарядів слухового апарату.

7

Рекомендації до використання

1. Перед початком користування приладом необхідно пройти професійний огляд та перевірку слуху у лікаря.
2. Не занурюйте пристрій у воду. Перед купанням або миттям волосся зніміть слуховий апарат і покладіть його у футляр. Після купання зачекочайте, поки не висохне слуховий прохід і лише потім встановлюйте прилад.
3. Після того, як ви знімете слуховий апарат на ніч, його слід зарядити, уникаючи впливу яскравого світла, високої температури та вологості.
4. Зовнішня поверхня слухового апарату має бути чистою. Також регулярно необхідно чистити беруші від вушної сірки.
5. Якщо під час користування приладом ви відчуваєте дискомфорт, припиніть його використання.
6. Якщо слуховий апарат не використовується протягом тривалого часу, батарея може розрядитися через наявність внутрішнього опору. Якщо прилад не вмикається, переконайтеся, що він повністю заряджений.
7. Забороняється кидати або упускати прилад, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів.
8. Слуховий апарат заборонено використовувати при високочастотній та променевої терапії, а також у місцях, де діють сильні магнітні поля.
9. Ніколи не використовуйте прилад у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
10. Слуховий апарат не можна викидати разом із побутовими відходами. Прилад підлягає утилізації на спеціалізованих станціях.
11. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм та аксесуарами до нього. Це дозволить уникнути травм або пошкодження приладу.

8

Немає звуку: що робити?

1. Переконайтеся, що слуховий апарат включається, сигналізуючи при затисканні клавіш увімкнення;
2. Налаштуйте гучність кілька разів, щоб переконаватися, що у приладі є звук;
3. Перед увімкненням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений і повторіть крок 1 та 2;
4. Якщо попередні рекомендації не допомогли, можна зробити висновок, що слуховий апарат не працює належним чином або несправний. У такому разі зверніться до центру обслуговування клієнтів для допомоги та вирішення питання.

Чуєте свистячий звук у вусі: що робити?

1. Переконайтеся, що слуховий апарат встановлений у вушний отвір герметично та до кінця.
2. Використовуйте беруші іншого розміру, переконайтеся, що вони не деформовані.
3. Переконайтеся, що немає багато скупчення вушної сірки. При необхідності видаліть її.
4. Переконайтеся, що слуховий апарат розташований правильно (не вгору ногами)

9

Способи транспортування та зберігання

1. Захищайте прилад від впливу на нього прямих сонячних променів та вологи.
2. Зберігайте у прохолодному та сухому місці.
3. Не допускайте механічних пошкоджень або сильного удару приладу.

Комплектація

Слуховий апарат: 2 шт (L/R)
Бокс (зарядний пристрій): 1шт.
Зарядний кабель: 1шт.
Беруші: комплект S, M, L.
Щітка для чищення: 1
Інструкція з експлуатації: 1 екз.

Дякуємо, що обрали CLEARTONE

10